



# AERO BORN MASQUE MK10

AFNOR SPEC S76-001 Version 1.10



Couleur: Blanc  
Taille unique



DPA Europe S.A.M  
7 rue du Gabian  
98000 MONACO



PENSEZ AU TRI !  
ENSEMBLE RÉDUISONS  
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
DES EMBALLAGES

EMBALLAGE  
PLASTIQUE  
À JETER

CARTONNETTE  
À RECYCLER



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETFR

COVID-19

## NOTICE D'UTILISATION MASQUE CATÉGORIE 2 TAILLE ADULTE

FABRIQUÉ  
AU PORTUGAL



### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention: si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque barrière n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (ex: masque filtrant type FFP2)
- Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le port de la barbe peut réduire l'efficacité de filtration en dehors des limites visées. La durée maximale d'utilisation est de 4 heures.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.
- Il permet à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections de particules. Il peut également apporter à l'utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux.



### COMMENT PORTER LE MASQUE ?

#### Avant de le mettre:

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trou, déchirures ou dégradations.
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

#### Pour le mettre:

05. Tenez le masque par les lanières.
06. Placez-le au niveau de votre bouche.
07. Passez les lanières derrière les oreilles.
08. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

#### Lorsque vous le portez:

09. Évitez de le toucher et de le déplacer.
10. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

#### Pour l'enlever:

11. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
12. Décrochez les lanières pour décoller le masque de votre visage.
13. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
14. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
15. Pour terminer: lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

#### Il faut changer le masque:

16. Quand vous avez porté le masque 4h.
17. Quand vous souhaitez boire ou manger.
18. Quand il devient difficile de respirer.
19. Si le masque s'humidifie.
20. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

### COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

#### Avant ouverture:

01. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une température entre -2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

#### Pour le lavage:

01. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 minutes à 60°C minimum. Vous pouvez le laver en machine avec votre linge.
02. Après avoir touché le masque, lavez vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
03. Ce masque a été testé pour 20 lavages. Après 20 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
04. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme sans forcer.

#### Après le lavage:

05. Faites sécher le masque dans son intégralité (la partie intérieure doivent également être totalement sèche).
06. Pour cela, vous pouvez utiliser un sèche cheveux ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
07. Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée au recto.
08. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre et hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

### SÉCURITÉ

Ce masque a démontré une efficacité de filtration de 70%, pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.

### AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.